

Anwender-Tipps und -Tricks zu GELCIDE ESSENTIALS

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns über Ihre Entscheidung, GELCIDE ESSENTIALS anzuwenden.
Ergänzend zur Gebrauchsanleitung finden Sie hier hilfreiche Tipps und Tricks von Vielenwender/innen.

Applikation im Video



Das mit diesem QR-Code verbundene Video zeigt die Applikation von GELCIDE ESSENTIALS in eine gereinigte 12mm-Zahnfleischtasche.

Hinweise zur Applikation

- Eine kleine Menge Lösung über der Tasche stehen lassen.
Dadurch entsteht, wie im Video zu sehen, ein guter Übergang zwischen Zahn und Zahnfleisch.
- Patienten nach Behandlung ausspülen lassen.
- Verhalten nach der Applikation: Drei Stunden nicht essen, nur Wasser trinken.
- Zahnpflege wie nach anderen Behandlungen.
- Bei aggressiven Fällen Behandlung mit GELCIDE ESSENTIALS nach ca. zwei Monaten wiederholen.

Sparsame Applikation

Mit einer „Spardorn-Spritze“ und einer „Endo-Kanüle“ kann GELCIDE ESSENTIALS besonders sparsam dosiert werden.
(Spritze z.B.: Sol-M 1 ml von B. Braun, Melsungen / PZN 17391358)



Vegetarier / Gluten

GELCIDE ESSENTIALS enthält keine Bestandteile von Tieren.
GELCIDE ESSENTIALS ist glutenfrei.

Abrechnung

Privatleistung. Abrechnung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich.
Lokale antibakterielle Therapie ist nicht in BEMA und der PAR-Richtlinie enthalten.

Hinweis: Ätherische Öle wirken antibakteriell **und** antientzündlich.
Die Wahl der GOZ Ziffer steht im Zusammenhang mit der Wirkungsbezeichnung.

„antibakteriell“	GOZ 4025 (15 Punkte)	Subgingivale antibakterielle Lokalapplikation. → <i>Materialkosten gesondert berechnungsfähig.</i>
------------------	-------------------------	---

Tipp: Eine angemessene Analogleistung wählen, Materialkosten einkalkulieren (auf gesonderte Berechnung verzichten)

„antientzündlich“	z.B. GOZ 4110a (180 Punkte)	Auffüllen von parodontalen Knochendefekten mit Aufbaumaterial (Knochen- und/oder KEM), auch Einbringen von Proteinen, zur regenerativen Behandlung parodontaler Defekte [...], je Zahn oder Parodontium oder Implantat. → <i>Materialkosten nicht gesondert berechnungsfähig.</i>
-------------------	-----------------------------------	--

Tipps: Bei steigenden Materialkosten oder höherem Verbrauch andere Analogposition wählen (z.B. 4138a (220 Punkte) oder 4100a (275 Punkte)). Analogposition in niedrigem Faktor wählen, damit Steigerung ohne Begründung möglich bleibt.

Ihre Ansprechpartnerin zu GELCIDE ESSENTIALS bei mds GmbH ist:

Frau Franziska Knoop (Produktmanagerin); Telefon: (0 26 24) 90 69 330; E-Mail: franziska.knoop@mds-dental.de.

Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen mit GELCIDE ESSENTIALS!

Ihre Medical & Dental Service GmbH